

Läs mer om SonoCheck, test för  
ultraljudsbad, på vår hemsida

[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

**MEDI PLAST** Mediplast AB | P.O. Box 9504 | SE-200 39 Malmö | Sweden | T +46 (0)40 671 23 00 | F +46 (0)40 671 23 10  
Home Products About us Distributors Suppliers Contact

Swedish website  
Danish website  
Finnish website  
Norwegian website

**Welcome...**  
Mediplast is an international trading company based in Sweden.  
We are marketing and selling medical technical equipment and medical disposable products.  
In the Nordic countries we market and sell products from our own Mediplast assortment as well as other suppliers.  
On Export outside the Nordic Area we sell only our Mediplast branded assortment.

**Latest News**  
04 May 2011  
**Mediplast finalizes another acquisition in the nordic region**  
» Read more...  
14 January 2011  
**Mediplast keeps expanding in the Nordic region**  
» Read more...

Knowledge makes a difference

### Mediplast AB

Box 49504. 200 39 Malmö  
Telefon kundtjänst 040 78 80 35  
Fax 040 671 23 10  
[mediplast.info@mediplast.com](mailto:mediplast.info@mediplast.com)

SonoCheck SE 120329

**MEDI PLAST**<sup>®</sup>

## SonoCheck

**Test för ultraljudsbad**



### Mäter kvaliteten på ultraljudsenergin i ultraljudsbadet

- Mäter graden av ultraljudsenergi
- Ultraljudsenergin utlöser en kemisk reaktion i ampullens testlösningen.
- Lätt att avläsa
- Resultatet kan avläsas omedelbart efter användningen.
- Färgen ändras från grönt till gult om provet är positivt.

**kunskap gör skillnad**

## Bruksanvisning:

SonoCheck är en indikator för kontroll av ultraljudsenergi



Säkerhetsmembran  
Indikatorlösning  
Kulor för kavitation \*

1. För funktions- och rutintest av ultraljudet placeras SonoCheck i instrumentkorgen tillsammans med en normal mängd instrument.
2. Sätt på ultraljudsbadet enligt avdelningens rutiner.
3. När processen är klar kontrolleras ampullen för att se om färgen har övergått från grönt till gult. Detta indikerar ett positivt resultat.
4. Den tid som krävs för att ampullen skall ändra färg ger samtidigt information om ultraljudsenergens styrka.
5. Resultatet kan registreras i analysjournal eller logbok.
6. Om resultatet inte är tillfredsställande, se Utvärdering av testet.

OBS! Använd inte SonoCheck i ultraljudsdiskmaskiner – på grund av att temperaturen är för hög under torkningsfasen.

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur – frostfritt  
Undvik solbelysning och värme  
Hållbarhet: Se förpackningen

Innehåll: 30 ampuller

- Kavitation är uppkomst av mikroskopiska bubblor som imploderar (klumpar ihop sig) och därvid frigör stora mängder energi.

## SonoCheck

Ultraljudsbad är ett viktigt hjälpmedel för rengöring av kirurgiska instrument. Därför bör ultraljudsenergens kvalitet och uppkomst av kavitation mätas regelbundet.

### Utvärdering av testet

Om ultraljudsbadet ger tillräcklig energi växlar färgen i testampullen. Om färgen inte växlar kan det finnas flera orsaker:

- För låg energinivå
- För många instrument
- För låg vattennivå
- För dålig avgasning
- För kort tid



### Tekniska specifikationer:

Varunr.	Produktbeskrivning	antal/ förp.
608040000755	SonoCheck	30